

Ihr Fachhändler:

Kaufdatum: / /

Notwendig für Garantie

HINWEISE FÜR DEN VERBRAUCHER

Die Garantie deckt sämtliche Produktmängel ab, die nachweisbar auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate nach Erhalt der Versandbereitschaft, spätestens nach der Lieferung. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch normalen Verschleiß und Abnutzung, absichtlich, nachlässig oder durch unsachgemäßen Betrieb oder Gebrauch verursacht wurden. Für die Verwendung unangemessener Pflegeprodukte, Schmieröle und Fette wird keine Garantie übernommen.

 **minniemobil**

Minniemobil GmbH
Grünwalderweg 28c
82041 Oberhaching
Phone: +49 89 651089 22
Info@minniemobil.com
www.minniemobil.com
Germany

 **minniemobil**



Zubehör MM-01 / MM-02 Kofferraum Montageanleitung

Kofferraum

Der abschließbare Minniemobil Kofferraum ermöglicht das Transportieren und Aufbewahren Ihrer Ladung. Im Deckel befinden sich Ablagen für kleine Utensilien. Die umlaufenden Halterungen ermöglichen die optionale Fixierung eines Verdecks.

BESTANDTEILE

- 1x Minniemobil Kofferraum
- 4x Kofferraumschrauben
- 2x Schlüssel



MONTAGE

Die vordere, obere Gehäuseschale des MM-01 und MM-02 ist im Bereich der Gummifläche mit sechs Schrauben am inneren Fahrzeugrahmen befestigt. Die zwei mittleren, ganz oben auf der Rundung dieser Gehäuseschale befindlichen Schrauben, verbleiben im Gehäuse.

Die zwei jeweils vorn und hinten befindlichen Schrauben dieser Gehäuseschale werden mit einem Inbusschlüssel herausgeschraubt (Abb. 1) und durch vier Kofferraumschrauben ersetzt (Abb. 2).

Wir empfehlen die ersetzten Standardschrauben für die Nutzung des MM-01 / MM-02 ohne Kofferraum zu verwenden.



Abb. 1



Abb. 2

⊘ Warnung!

Das Eigengewicht des Kofferraumes beträgt 2,4 kg.
Die maximale Beladung des Kofferraumes beträgt 20 kg.
Das zulässige Gesamtgewicht des MM-01/ MM-02 beträgt 355 kg.
Das Leergewicht (ohne Batterien) beträgt beim MM-01 143kg.
Die maximal erlaubte Zuladung (inklusive Batterien, Fahrer, Summe aller Zubehöre und Zuladung) ergibt sich aus zulässigem Gesamtgewicht - Leergewicht (355 kg - 143 kg = 212 kg).

