



Sitzkissen / Rückenlehnekissen Befestigung und Gebrauch

SITZKISSEN / RÜCKENLEHNEKISSEN

Die minniemobil Kissen sorgen für zusätzlichen Komfort auf Ihrem Sitz und/oder an Ihrer Rückenlehne. Zwei unterschiedliche Grade von Weichheit stehen zur Verfügung: Weich und Extra weich.

Jedes Kissen verfügt über eine abnehmbare Tasche die für kleine Utensilien genutzt werden kann.

Diese zusätzliche Tasche findet nur Verwendung in ihrem Einsatz als Sitzkissen.

EINZELTEILE

1 Stoffbespannung

1 Abnehmbare Tasche

1 Weiches / Extra weiches Schaumpolster



ABNEHMBARE TASCHE: ABNEHMEN UND BEFESTIGEN

1. Fädeln Sie bitte die Riemen in die Schlaufen der extra Tasche ein (Abb. 1).
2. Nutzen Sie den Klettverschluss des Bandes, um die Tasche am entsprechenden Kissen zu befestigen (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

BEFESTIGUNG AM SITZ

1. Legen Sie das Kissen auf den Sitz so dass die extra Tasche über die Sitzvorderkante hängt (Abb. 3).
2. Fädeln Sie die 6 Riemen (3 vorne und 3 hinten) des Kissens durch die Metallschlaufen auf der Unterseite (Abb. 4) und befestigen sie diese mit dem Velcro Streifen (Abb. 5).
3. Um zu verhindern dass das Kissen auf dem Sitz verrutscht empfehlen wir die Riemen nach Montage nochmal einzeln nachzuziehen (Abb. 6).



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

BEFESTIGUNG AN DER RÜCKENLEHNE (Durchzuführen von Ihrem Fachhändler)

1. Demontieren sie die Rückenlehenschale indem sie die vier Schrauben lösen (Abb. 7).
2. Platzieren Sie das Kissen (ohne die extra Tasche) mit der kürzeren Seite (das Kissen hat eine Trapezform) nach oben. (Abb. 8).
3. Fädeln Sie die 6 Riemen (3 vorne und 3 hinten) des Kissens durch die Metallschlaufen auf der Rückseite und befestigen sie diese mit dem Velcro Streifen (Abb. 9).
4. Um zu verhindern dass das Kissen verrutscht empfehlen wir die Riemen nach Montage nochmal einzeln nachzuziehen (Abb. 10).
5. Befestigen Sie die Rückenlehenschale wieder mit den vier Schrauben an der Rückenlehne.

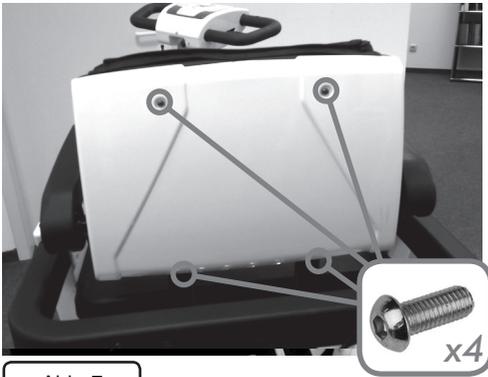


Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10

HERAUSNEHMEN DES SCHAUMPOLSTERS

Es ist möglich, das Schaumpolster aus der Stoffbespannung herauszunehmen, um es durch ein alternatives Material zu ersetzen.

1. Auf der Rückseite der Kissen (entgegengesetzt zur Taschenseite) befindet sich eine mit Klettverschluss befestigte Lasche (Abb. 11). Öffnen Sie diese.
2. Öffnen Sie dann den nun sichtbaren Reißverschluss und nehmen Sie das Schaumpolster aus der Stoffbespannung (Abb. 12).
3. Verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge, um Stoffbezug und Schaumpolster wieder zum Kissen zusammenzufügen.



Abb. 11



Abb. 12

Warnung!

Obwohl die Kissen grundsätzlich wasserabweisend sind, können sie durchaus nass werden, falls sie nicht nur kurzfristig Regen oder sonstiger Nässe ausgesetzt werden.

Ihr Fachhändler:

Kaufdatum: / /

Notwendig für Garantie

HINWEISE FÜR DEN VERBRAUCHER

Die Garantie deckt sämtliche Produktmängel ab, die nachweisbar auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate nach Erhalt der Versandbereitschaft, spätestens nach der Lieferung. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch normalen Verschleiß und Abnutzung, absichtlich, nachlässig oder durch unsachgemäßen Betrieb oder Gebrauch verursacht wurden. Für die Verwendung unangemessener Pflegeprodukte, Schmieröle und Fette wird keine Garantie übernommen.

 **minniemobil**

Minniemoobil GmbH
Grünwalder Weg 28c
82041 Oberhaching
Phone: +49 89 651089 22
Info@minniemobil.com
www.minniemobil.com
Germany