



Taschenhaken Montageanleitung

TASCHENHAKEN

Der minniemobil Taschenhaken ermöglicht das Aufhängen zu transportierender Gegenstände an einem Haken. Außerdem findet er Verwendung zum Aufrasten weiterer Zubehörs sowie zur Arretierung des Rollators auf dem Rollatorträger.

BESTANDTEILE

1x Taschenhaken



Warnung!

Jeder Haken kann mit maximal 5 kg / 11 lbs belastet werden.

MONTAGE (Durchzuführen durch Ihren Fachhändler)

1. Demontieren der Rückenbarriere

- 1.1. Die Rückenbarriere ist mit zwei Schrauben am Elektromobil befestigt. Schrauben Sie diese auf (Abb. 1).
- 1.2. Ziehen Sie nun die Rückenbarriere nach hinten (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

2. Anbringen des Taschenhakens

- 2.1. Stecken Sie den Taschenhaken auf eines der Enden der Rückenbarriere mit dem Haken nach unten (Abb. 3). Die Aufrastschiene darf dabei sowohl nach innen als auch nach außen weisen. (Jedoch nur nach außen, sofern er später, mit einem Sperr-Riegel bestückt, auch zur Arretierung des Rollators auf dem Rollatorträger dienen soll.)
- 2.2. Nun können Sie der Rückenbarriere den Taschenhaken überstreifen, indem Sie ihn mit beiden Händen an die gewünschte Position rutschen (Abb. 4).

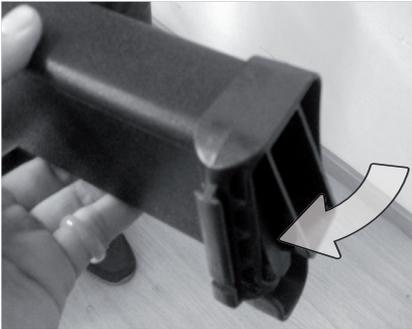


Abb. 3

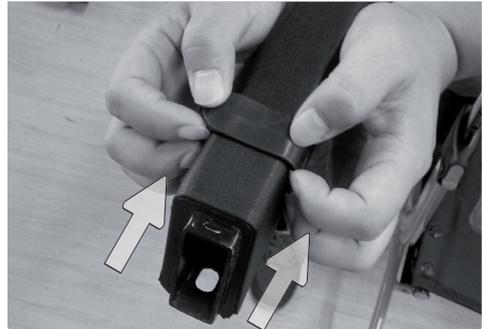


Abb. 4

3. Montieren der Rückenbarriere

- 3.1. Bringen Sie die Rückenbarriere durch Andrücken wieder in ihre Ausgangsstellung.
- 3.2. Befestigen Sie die Barriere mit den beiden Schrauben.

VERWENDUNG

1. Der Haken dient zunächst dem Aufhängen leichter Gegenstände, wie etwa kleiner Taschen.
2. Darüber hinaus können wahlweise verschiedene Zubehörteile erworben werden, welche durch Herunterdrücken auf die Aufrastschiene des Hakens angebracht werden (Abb. 5). (Verwendungsbeispiel zweier "Sperr-Riegel" als Rollatorarretierung in der Mitte der Rückenbarriere siehe Abb. 6)

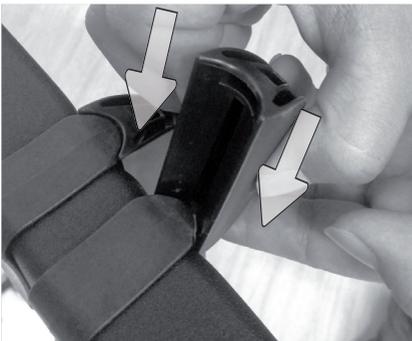


Abb. 5



Abb. 6

Ihr Fachhändler:

Kaufdatum: / /

Notwendig für Garantie

HINWEISE FÜR DEN VERBRAUCHER

Die Garantie deckt sämtliche Produktmängel ab, die nachweisbar auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate nach Erhalt der Versandbereitschaft, spätestens nach der Lieferung. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch normalen Verschleiß und Abnutzung, absichtlich, nachlässig oder durch unsachgemäßen Betrieb oder Gebrauch verursacht wurden. Für die Verwendung unangemessener Pflegeprodukte, Schmieröle und Fette wird keine Garantie übernommen.

 **minniemobil**

Minniemobil GmbH
Grünwalder Weg 28c
82041 Oberhaching
Phone: +49 89 651089 22
Info@minniemobil.com
www.minniemobil.com
Germany