



Ladegerät Wandhalterung Montage- und Gebrauchsanleitung

LADEGERÄT WANDHALTERUNG

Ästhetisch schlichte Wandhalterung für das Ladegerät Ihres minniemobil.

1. BESTANDTEILE

- 1 Wandhalterung
- 2 Schrauben
- 2 Wanddübel



Abb. 1

2. MONTAGE

- 2.1. Halten Sie die Wandhalterung an der gewünschten Stelle gegen die Wand und richten Sie sie aus mit der Wasserwaage.
- 2.2. Zeichnen Sie nun die entsprechend benötigten Punkte für die zwei Bohrlöcher an (Abb. 2).
- 2.3. Bohren Sie die Löcher und führen Sie die Dübel ein.
- 2.4. Halten Sie die Wandhalterung gegen die Wand und befestigen Sie die Schrauben.

3. BENUTZUNG

- 3.1. Setzen Sie das Ladegerät in die Wandhalterung ein.
- 3.2. Wickeln Sie überschüssiges Kabel auf hinter der Rückwand der Wandhalterung (Abb. 3).
- 3.3. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose ein.
- 3.4. Platzieren Sie den Anschlussstecker des Ladegeräts für das Elektromobil in der hierfür vorgesehenen Einbuchtung der Wandhalterung, sodass er jederzeit für Sie griffbereit ist, wann immer der Akku Ihres minniemobil einer Aufladung bedarf (Abb. 4).



Abb. 2

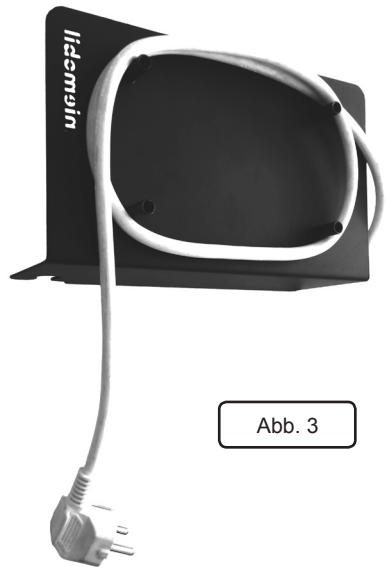


Abb. 3



Abb. 4

Ihr Fachhändler:

Kaufdatum: / /

Notwendig für Garantie

HINWEISE FÜR DEN VERBRAUCHER

Die Garantie deckt sämtliche Produktmängel ab, die nachweisbar auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate nach Erhalt der Versandbereitschaft, spätestens nach der Lieferung. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch normalen Verschleiß und Abnutzung, absichtlich, nachlässig oder durch unsachgemäßen Betrieb oder Gebrauch verursacht wurden. Für die Verwendung unangemessener Pflegeprodukte, Schmieröle und Fette wird keine Garantie übernommen.

 **minniemobil**

Minniemobil GmbH
Grünwalder Weg 28c
82041 Oberhaching
Phone: +49 89 651089 22
Info@minniemobil.com
www.minniemobil.com
Germany